

機械器具 81 磁気治療器  
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000)  
ピップエレキバンワイド


磁石の再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

心臓ペースメーカー等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、使用しないでください。[誤作動を招くおそれがあるため]

## 【形状・構造及び原理等】

- 構成  
本体  
添付文書

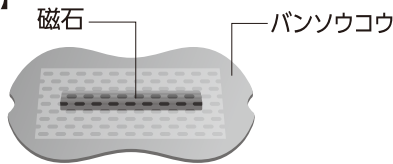

- 原理  
永久磁石の磁力を利用して、人体に磁力線を浸透させて治療します。

- 最大磁束密度  
80mT(ミリテスラ)

## 【使用目的又は効果】

一般家庭での磁気治療に使用する。  
装着部位のこり及び血行の改善

## 【使用方法等】

ご使用にあたっては、説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

- 使用方法  
(1) 本体の透明フィルムをはがします。  
(2) こりのある箇所に貼り付けます。  
(3) 使用後は、すぐに捨てます。


## 【使用上の注意】

- 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。[症状が悪化するおそれがあるため]
  - 悪性腫瘍のある方
  - 心臓に障害のある方
  - 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
  - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
  - 皮膚に感染症または創傷のある方
  - 安静を必要とする方
  - 体温38℃以上(有熱期)の方  
例1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期  
例2. 衰弱しているとき
  - 捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方
- 使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。
- 機器の取り扱いには次のことにご注意ください。
  - 他の治療器と同時に使用しないでください。
  - 頭部には使用しないでください。
  - 機器は改造しないでください。

- 使用する前には次のことにご注意ください。
  - 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
  - しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
- 使用中には次のことにご注意ください。
  - 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
  - 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
  - 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査の前に取りはずしてください。
- 使用後及び保管には次のことにご注意ください。
  - 機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。
- 透明フィルムからずれるのを防ぐため磁石が同じ向きになるように重ねて保管してください。  
(図以外の重ね方をすると透明フィルムから製品がずれる原因になります。)

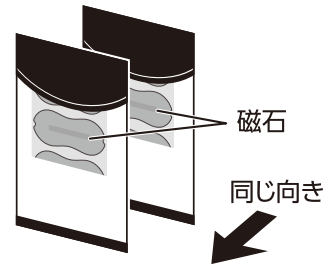

- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

## 【保守・点検に係る事項】

使用に際し、異物の付着等がないか確認の上ご使用ください。常に使用前の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、弊社お客様相談室までご連絡ください。

## 【包装】

1個箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:ピップ株式会社  
住所:奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場)  
お問い合わせ先:お客様相談室(説明書参照)  
製造業者:ピップ株式会社  
住所:大阪市中央区農人橋2丁目1番36号

# ピップエレキバン® ワイド説明書

コリをほぐすために、  
必ずお読みください。



ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

1. 誤飲を防ぐために使用後は、すぐに捨ててください。磁石の再使用はおやめください。  
小児および監督を必要とする方が手にとると、誤って磁石をバンソウコウからはずして飲み込むおそれがあります。
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。磁石が体内で滞留すると、開腹手術が必要になるおそれがあります。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。  
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。


1. 肌に異常がある場合は使用しないでください。症状が悪化するおそれがあります。
2. 目の周囲や粘膜に貼らないでください。
3. 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、気になる場合は、医師にご相談ください。
4. かぶれを防ぐために下記の事項をお守りください。  
(1) かゆみや痛みを感じた場合は、すぐにはがしてください。位置を少しずつずらして新しいものと貼りかえてください。  
(2) 同じところに続けて貼らないでください。過去にかぶれた経験のある方は特に注意してご使用ください。
- 万一かぶれた場合は、すぐに医師にご相談ください。

## ご使用方法について

### 1 透明フィルムからのとりはずし方

図のように透明フィルムのミシン目の左右をつまみ前後に広げるようにはずしてください。

※白いテープはとりはずさずにご使用ください。

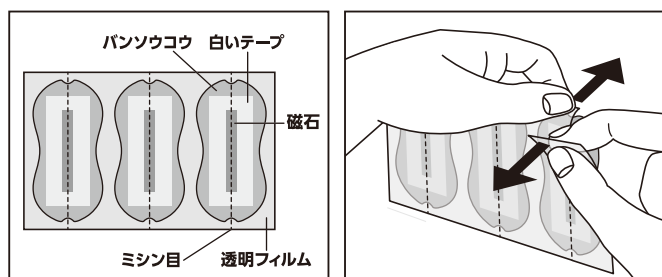


### 2 貼り方

コっている部位に沿って貼ります。

## 2日以上貼る

のがおすすめです。

入浴中もご使用いただけます。

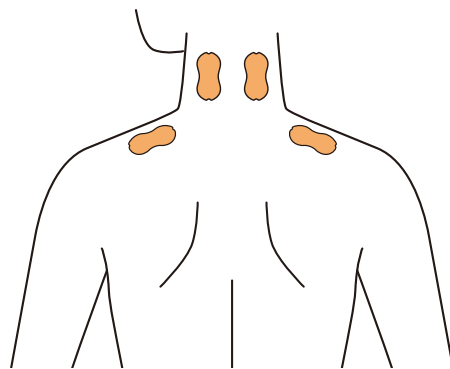


※実際のバンソウコウは、肌立ち色に合う肌色です。


### ▶ 貼り方の例



ピンと張った  
足裏に

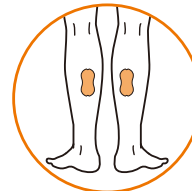

パンパンの  
ふくらはぎに

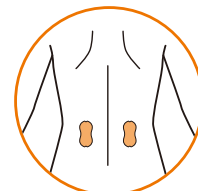

ズーンと  
重たい腰に

### お願い

### はがれを防ぐために

1. 皮膚をよくふいてから貼ってください。  
(スポーツ後や入浴後は汗が引いてから貼ってください。)
2. バンソウコウが重ならないように貼ってください。
3. バンソウコウがシワにならないように注意してしっかり貼ってください。
4. 一度貼ったらはがさず バンソウコウを軽く押さえてください。
5. 粘着力が低下するので **貼りなおさないでください。**
6. 入浴中は貼っている部位を強くこすらないでください。

### 3 はがし方

ゆっくりはがしてください。

痛みを感じる場合は、お風呂やシャワーで十分濡らし皮膚を押さえながらはがしてください。

使用後の磁石は、再使用せず、すぐに捨ててください。

## 保管方法について

透明フィルムからずれるのを防ぐため磁石が同じ向きになるように重ねて保管してください。直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

お問い合わせ

**ピップ株式会社**  
大阪市中央区農人橋2-1-36  
〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427

土日・祝日を除く10:00~17:00

〈エレキバン〉ホームページ [elekiban.pipjapan.co.jp](http://elekiban.pipjapan.co.jp)