

ヒアルロン酸Naで
(粘稠剤として)
しっとり潤う1本ケア

ソフトコンタクトレンズ用
洗浄・すすぎ・消毒・保存液

BIOCLEN®
ONE
バイオクレン®ワン
Ultra Moist
しっとり潤い系

オフテクス

使用説明書

医薬部外品

販売名:バイオクレンMPSV

*ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

*使用説明書に記載された使用方法や注意事項にしたがって正しく使用しないと、洗浄や消毒が不完全となり目の感染症などの原因となることがあります。また、それが進行すると視力を失う危険性も生じますので、この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。

*ご使用中のソフトコンタクトレンズの取扱いについては、その取扱説明書をお読みください。

ソフトコンタクトレンズは水分を含むため柔らかく、装用感は非常に良好です。しかしその反面、様々な汚れや微生物が付着します。レンズを清潔に保ち、眼障害を防ぐためには毎日の正しいケアが必要です。バイオクレン®ワン ウルトラモイストは、1本で洗浄・すすぎ・消毒・保存ができる、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本生まれのソフトコンタクトレンズ用消毒剤です。

眼感染症を起こさないために

正しいレンズケアを行わないと、アカントアメーバ角膜炎等の重篤な眼感染症につながる恐れがあります。眼感染症を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

- 眼科医等の専門家に、正しいケア方法の指導を受けましょう。
- レンズを取扱う前には、必ず石鹼等で手をきれいに洗ってください。
- 必ずレンズのこすり洗いとすすぎを行いましょう。
- 使用後のレンズケースは、本剤又は水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。
- レンズケースは2ヵ月を目安にお取り換えください。
- 目の健康を守るために、3ヵ月に1度は定期検査を受けましょう。

使用方法

レンズを取り扱う前には、必ず石鹼等で手をきれいに洗ってください。

消毒・洗浄



目からレンズをはずし手のひらにのせ、本剤を数滴つけ、レンズの両面を各々、20～30回指で軽くこすりながら洗ってください。


すすぎ



洗ったレンズの両面を本剤で5秒以上すすぎでください。

消毒・保存

使用後のレンズケースは、本剤または水道水でよく洗った後、自然乾燥させてください。

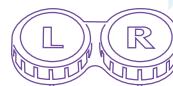

レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に液中に沈めてからふたをしっかりとしめください。そのまま4時間以上放置すると消毒が完了します。レンズ装用前にも、再度5秒以上すすぎを行ってください。

タンパク除去について

汚れには個人差があり、毎日のレンズケアだけでは汚れを完全に除去できない場合があります。

汚れがひどい方には、タンパク除去剤『クレンスター』の併用をおすすめします。

『クレンスター』は、バイオクレン®ワン ウルトラモイスト等のソフト用1本タイプ(MPS)に、毎日レンズ1枚につき1滴加えて使用するタイプの液体タンパク分解酵素洗浄剤です。

タンパク汚れを毎日、分解・除去することで快適な装用感を実感できます。くわしくは『クレンスター』の説明書をよく読んで、必ず使用方法にしたがってください。

レンズの長期保存方法

レンズを長期間使用しない場合は、はじめに本剤によるこすり洗いとすすぎを行ってください。その後、本剤を満たしたケースにレンズを保存してください。その際、直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。ケースのふたを開けなければ、そのまま1ヵ月間レンズを保存できます。1ヵ月を超えて保存する場合は、1ヵ月に1回、新しい薬液に交換してください。レンズを装用する前には、本剤でレンズをすすいでください。

使用上の注意

*守らなければならないこと

- (1)この使用説明書に記載している使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると消毒が不完全となり、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- (2)レンズを取扱う前には、必ず石鹼等で手をきれいに洗ってください。
- (3)この使用説明書に記載している使用方法にしたがい、必ずこすり洗いを行ってください。
- (4)使用後のレンズケースは空にして、本剤または水道水でよく洗った後、自然乾燥させてください。清潔なケースを使用しないと雑菌が繁殖し、目への感染や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

*してはいけないこと

- (1)本剤はソフトコンタクトレンズの洗浄・すすぎ・消毒・保存にのみ使用し、飲まないでください。
- (2)容器の先に触れないでください。雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがあります。また、混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- (3)本剤は煮沸消毒に使用しないでください。また、他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と併用したり、混ぜて使用しないでください。
- (4)消毒液は再使用や、継ぎ足しをせず、毎日交換してください。
- (5)使用期限(EXP.Date)を過ぎたものは使用しないでください。
- (6)本剤とメニコン社のメニクリーンは併用しないでください。

*相談すること

- (1)次の人は使用前に眼科医に相談してください。
 - a)今までに目のアレルギー症状(たとえば目の充血、かゆみ、はれ、発疹・発赤等)を起こしたことがある人。
 - b)眼科医の治療を受けている人。
- (2)本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装用中、または装用後に、痛み、充血、流涙、目ヤニ、ゴロゴロ感、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、眼科医にご相談ください。
そのまま装用し続けると、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害につながることがあります。
- (3)本剤を使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。特にアレルギー体质の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用してください。

【販売名】バイオクレンMPSV

【効能または効果】ソフトコンタクトレンズ(グループI~IV)の消毒

【用法および用量】

- 1.ソフトコンタクトレンズに本剤を数滴つけ、レンズの両面を各々、20~30回指で軽くこすりながら洗います。
- 2.洗ったレンズの両面を本剤で十分すすぎます。
- 3.レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に浸し、4時間以上放置します。

【有効成分】1mL中ポリヒキサニド塩酸塩0.001mg含有

【配合成分】界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤

【表示指定成分】ホウ酸、エデト酸塩

本剤はポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有しています。

【保管および取扱い上の注意】

- (1)小児の手の届かないところに保管してください。
- (2)使用後はキャップをしっかりしめて、直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)ケースは長期間使用していると汚れ等の蓄積により雑菌の繁殖をまねくことがあります。
ケースは、2ヵ月を目安に新しいものとお取り換えください。
- (5)開封後は1~2ヵ月以内を目安に使用してください。

6-1203150

株式会社 オフテクス 神戸市中央区港島南町5-2-4
www.ophtecs.co.jp

オフテクスお客様相談室 ☎ 0120-021094

受付:月~金(祝日は除く) 9:00~17:00