

オプティ・フリー®

マルチパーパスソリューション

全ソフトコンタクトレンズ適用 **医薬部外品**

- ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- オプティ・フリー® (マルチパーパスソリューション以下、MPS) はソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものですが、この説明書に記載された使用方法や注意事項にしたがって正しく使用しないと、洗浄・消毒が不完全となり、細菌やかびなどによる目の感染症などの原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- ソフトコンタクトレンズをご使用になる前に、その添付文書もあわせてよくお読みください。

ハードレンズ(酸素透過性を含む)にはご使用いただけません。

ソフトコンタクトレンズは水分を含有しているため、装着していると涙液中に含まれるタンパク質や脂肪分などがレンズに付着します。この汚れをそのままにしておく、装着感が悪くなり、細菌やかびなどの繁殖をゆるし、目の感染症を引き起こすことがあります。また、レンズの品質を劣化させることもあります。このようなことを防ぐため、ソフトコンタクトレンズの毎日の洗浄、すすぎ、消毒のケアを正しく行うことが必要です。

使用方法

ステップ1-洗浄(こすり洗い)

あらかじめ石けんなどで手をよく洗っておきます。レンズをはずし、手のひらの上にのせ、本剤を1~2滴たらし、レンズの両面を各々20秒ほど指でこすり洗います。

ステップ2-すすぎ

レンズの両面を本剤で完全に(10秒間以上)すすぎます。

ステップ3-保存(消毒)

レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に浸し、レンズケースのふたを完全に締めます。4時間以上放置しておけば消毒が完了します。本剤ですすいだから、レンズを装着します。

使用上の注意

1.守らなければならないこと

- 1) この説明書に記載してある使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると消毒が不完全となり、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- 2) レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をよく洗いよくすすいでください。
- 3) 清潔なレンズケースを使用しないと、雑菌が繁殖し、目の感染や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもありますので、レンズを取り出した後のレンズケースは、空にして新しい本剤でよくすすぎ、自然乾燥してください。
- 4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 5) 目に異常を感じなくても、指示された定期検査を必ず受けてください。

2.してはいけないこと

- 1) 本剤はソフトコンタクトレンズの消毒にのみ使用し、飲まないでください。
- 2) 容器の先がコンタクトレンズや指先などに触れると雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがあるのでご注意ください。また、混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- 3) 煮沸消毒に使用しないでください。また、他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と併用したり、混ぜて使用しないでください。
- 4) レンズを取り出す際には、使用の都度ケース内の液は捨て、毎日新しい液を使用してください。
- 5) 一度出した液を再びボトル容器に戻さないでください。
- 6) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

3.相談すること

- 1) 次の人は、使用前に**眼科医**にご相談ください。
 - a) 今までに**目のアレルギー症状**(例えば、目の充血、かゆみ、はれ、発疹、発赤など)を起こしたことがある人
 - b) 眼科医の治療を受けている人
- 2) 本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装着中、または装着後に、**痛み、かゆみ、充血、流涙、目やに、ごごろ感(または異物感)、灼熱感(焼けつくような感じ)、かすみ目、かわき目、まぶしさ**などの異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、**眼科医**にご相談ください。そのまま装着し続けると、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害につながる可能性があります。

効能・効果

ソフトコンタクトレンズ(グループI~グループIV)の消毒

用法及び用量

以下の1)から3)の順序で操作を行う。

- 1) コンタクトレンズをはずし、本剤でレンズの両面を各々、約20秒間洗浄する。
- 2) レンズの両面を本剤で完全に(少なくとも10秒間以上)すすぎ。
- 3) レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に浸し、ケースの蓋を完全に締める。そのまま4時間以上放置する。

成分

1mL中 塩化ポリドロンウム 0.011mg 含有、安定化剤(エデト酸塩)、緩衝剤、等張化剤、pH調整剤

保管および取扱い上の注意

- 1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 2) 使用後は、キャップをしっかりと締めて、直射日光を避け、室温で保管してください。
- 3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えたりしないでください。
- 4) レンズケースは長期間使用していると汚れなどの蓄積により細菌の繁殖をまねくことがありますので、レンズケースは定期的に新しく交換することをお勧めします。
- 5) 容器を開封したら、1カ月を目安に使用してください。
- 6) 開函時に容器のキャップを包んでいるラップが破られていたり、あるいは、はずれていた場合は使用しないでください。

ソフトコンタクトレンズを長期間装着していると涙液中に含まれるタンパク質や脂肪分などがレンズに徐々に付着し、レンズのくもりの原因となったり装着感がそこなわれるばかりでなく、目の炎症などの原因となることがあります。レンズをより安全に快適に装着していただくため、別にタンパク分解酵素洗浄液等を用意しておりますので、併せてご使用されることをお勧めいたします。

● スープラクレンズ®(タンパク分解酵素洗浄液) 別売品

オプティ・フリー®(MPS)の使用方法にしたがってレンズを洗浄、すすいだ後、オプティ・フリー®(MPS)を満たしたレンズケースの左右に毎日1日1滴ずつ加え、装着する前にすすぐだけで、清潔で新しいレンズのような装着感をお届けします。

※ご使用の際は、製品に添付されている製品説明書をよくお読みください。

● オプティ・フリー®デイリークリーナー(洗浄液) 別売品

オプティ・フリー®デイリークリーナーは、微粒子高分子ポリマーと非イオン系界面活性剤の働きで、レンズの表面のタンパク質、ムチン、脂肪などの付着物を効果的に除去する洗浄液です。

※ご使用の際は、製品に添付されている製品説明書をよくお読みください。

製品に関するお問い合わせは **フリーダイヤル ☎ 0120-086-123**

受付時間 **9:30~12:00/13:00~17:30**(土、日、祝日、社休日を除く)

Alcon® 製造販売元(輸入元)
日本アルコン株式会社
東京都港区赤坂2-17-7
<http://www.opti-free.jp>