

プロジェクト使用説明書

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用強力タンパク洗浄液

プロジェクト


点眼・服用厳禁

主成分:A液=次亜塩素酸ナトリウム(強アルカリ) 5ml B液=臭化カリウム(強アルカリ) 5ml

特長

プロジェクトは、酸素透過性ハードコンタクトレンズに固着したタンパク汚れを除去する強力洗浄液です。

原則として1カ月に1回、専用容器(プロジェクトバイアル)にA液とB液を入れ、洗浄保存液(O₂ケア、O₂ケアミルファフレッシュなど)で洗浄したレンズを30分でスピード洗浄します。

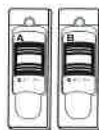

プロジェクト
A液・B液



プロジェクトバイアル
(別売品)

使用方法をお守りください

- ご使用前には、この使用説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
- 取扱方法を誤るとレンズが装着できなくなるばかりか、眼に障害を起す場合があります。少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の診察を受けてください。
- プロジェクトはソフトコンタクトレンズには使用できません。
- レンズの取り扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などをよく守ってください。
- 次亜塩素酸系処理液のプロジェクトは、作用が強力なため、タンパク汚れを短時間で洗浄できます。しかし、取り扱いを誤ると、眼に障害を与えるほか、皮ふが荒れたり、衣服などを損うことがありますので、注意して使用してください。
- 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜると)、有害な塩素ガスが出て危険です。

使用上の注意

1. 今までにケア用品などによってアレルギー症状などを起こしたことがある場合は、使用前に眼科医に相談してください。
2. 絶対に点眼・服用しないでください。誤って点眼した場合や眼に入った場合は、すぐに水道水(流水、以下同じ)で10~20分間よく洗い流し、すぐに眼科医の診察を受けてください。また、誤って飲んだ場合は、すぐに牛乳か生卵を飲み、すぐに医師の診察を受けてください。
3. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
4. 変質・変色したものは使用しないでください。
5. 小さなお子さまがご使用になる場合には、保護者の方の指導監督をお願いします。

**点眼したり、飲んだり
しないでください!!**



保管及び取り出し


1. 直射日光、蛍光灯の光などから遮らせて保管してください。
2. 小さなお子さまの手の届かない場所
乳幼児などの小さなお子さまがいちしゃる場合は、特にご注意ください。誤って点眼したり、飲んだり、皮ふにつけたりしないように、絶対に小さなお子さまの手の届かないところで使用・保管してください。
3. レンズ装用中、眼や皮ふなどに異物の使用を中止し、すぐに医師に

**小さな
届かない
保管**

6. プロジェクト処理後のレンズは必ず、水道水ですすぎ(30秒程度水ですすぎ)した後、眼にはめてください。

※1. プロジェクトの液が付着したレンズを必ず、水道水ですすぎ、洗浄保存液で

※2. 水道水ですすぎが不十分の場合は、ヤキズなどがあると、プロジェクトの液が落ちます。再度プロジェクト処理を行っていただくをお試しください。それでも眼の検査をお受けになってください。

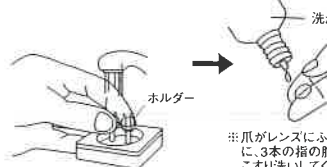

7. 外箱に記載の酸素透過性ハード

8. 使用した処理液とA・B液の空容器を捨てないよう配慮して捨ててください。

9. 使用期限は外箱に記載されています。

10. プロジェクト処理には専用容器プロジェクトバイアルを使用してください。

11. 混合した液をそのまま放置すると、損傷がありますので、処理後の液を必ず取り除いてください。

12. 使用のたびに、A・B液を混合してA・B液を混合し、一度使用した液は必ず取り除いてください。

13. 衣服・布などに付着させないでください。誤って、衣服や皮膚に付着した場合、水で洗い流してください。

14. 次の場合などにレンズが脱色・変色してもレンズの性能には問題ありません。また眼科にて眼とレンズの検査を受けてください。

- プロジェクトにレンズを長時間つけっぱなしにしている場合
- プロジェクトを長期間使用している場合
- プロジェクトの処理回数が多い場合

使用方法



- 通常の洗浄保存液（O₂ケア、O₂ケアミルファフレッシュなど）での洗浄とは別に、原則として月に1回ブローゼント処理を行います。
- レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水（流水、以下同じ）でよくすすいでください。

- ブローゼントバイアル（別売品）のキャップを矢印の方向に回し、キャップをはずします。
- レンズを眼からはずし、左右間違えないようにブローゼントバイアルのホルダーに収納します。
- 右側のレンズをホルダーからはずします。
- レンズに洗浄保存液を十分につけ、爪がレンズにふれないように3本の指の腹で十分にこすり洗いしてください。
- 洗い終えたレンズをブローゼントバイアルのホルダーに収納します。
- 左側のレンズも同様に、③～⑤の処理を行います。
- レンズをホルダーごと水道水で十分にすすぎます。
- ブローゼントのA液とB液を、ブローゼントバイアル本体にいれます。

■ブローゼントのA・B液の容器の開け方
開口部を上にして、開口部を静かにゆっくりと回しながら、開けてください。
開口部を強く回したり、あわてて回したり、無理にひきちぎったり、容器本体を強く押しながら開けたりすると、ブローゼント液が飛び散って眼に入ったり、衣服などに付着することがあります。

■ブローゼントバイアルへの液の入れ方
A液とB液の容器をブローゼントバイアルのやや中に入れます。ゆっくりと液が飛ばないように注意しながら、全部入れてA・B液を混合してください。
※小さなおさまがさわらないように、空になった容器は、すぐに捨ててください。

- レンズを収納したホルダーを、ブローゼントバイアル本体にもどし、キャップを最後まで回します。
※A・B液を混合したら、すみやかにホルダーを本体にもどしてください。
- ブローゼントバイアルを軽く2～3回振り、そのまま30分程度つけ置きし、レンズのタンパク洗浄を行います。
※ブローゼントによりレンズが脱色・変色する場合がありますが、レンズの性能には問題ありません。
- キャップをはずし、レンズをホルダーごと取り出し、水道水で十分すすぎます。（30秒程度）
※キャップを回してははずす際は、レンズがバイアル本体にふれないように、まっすぐ上方に引き上げてください。
- 右側のレンズをホルダーからはずします。

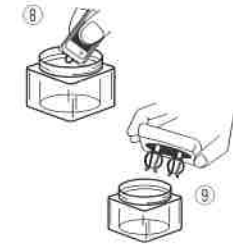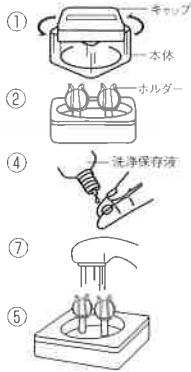

- レンズに洗浄保存液を十分につけ、爪がふれないように3本の指の腹で十分にこすり洗いしてください。

- レンズを眼にはめる時
- レンズをブローゼントバイアルのホルダーから取り出し、レンズを十分にすすぎます。
 - 左側のレンズも同様に、⑫～⑭の処理を行います。
 - レンズをホルダーごと水道水で十分にすすぎ、ホルダーからはずして眼にはめます。
 - ブローゼントバイアルを水道水ですすぎ、乾燥させます。

- レンズを保存する時
- レンズをレンズケースのホルダーに収納し、十分にすすぎます。
 - 洗浄保存液の入ったレンズケースに、レンズを収納します。
 - 左側のレンズも同様に、⑫⑬⑭⑮の処理を行います。
 - ブローゼントバイアルを水道水ですすぎ、乾燥させます。

- 保存後にレンズを眼にはめる時
- 右側のレンズをホルダーごとレンズケースから取り出し、レンズを十分にすすぎます。ホルダーからレンズを取り出し、眼にはめます。
 - レンズケースの中の液を捨て、ケースを十分にすすぎ、乾燥させます。

※レンズに付着する汚れは個人差があり、洗浄方法が異なる場合があります。眼科医の指示に従ってください。

■使用記録 原則として月1回：眼科医の指示に従ってください。

使用回数	1	2	3
処理日 月/日			

◎お気づきの点はこちらまで
メニコンお客様センター

メニコン 01

受付時間 / 9:00～18:00

株式会社 メニコン
名古屋市中区葵三丁目21番19号

Menicon Co., Ltd. MADE IN JAPAN