

エーオーセプト® クリアケア® AOSEPT®



医薬部外品

- ご使用前に必ずこの使用説明書をよく読み、表現や内容でわからないところがあれば、眼科医または販売店に相談してからご使用ください。
- この使用説明書は必要なときに読めるように大切に保管してください。
- 本剤はソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものですが、この使用説明書に記載された使用方法や注意事項に従って正しく使用しないと、洗浄・消毒が不完全となり、目の感染症等の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- ソフトコンタクトレンズの取扱いについては、レンズの添付文書をよくお読みください。

ソフトコンタクトレンズは、水分を多く含んでいるだけでなく、涙に含まれるタンパク質や脂質などがレンズに付着しやすくなっています。この汚れを放置しておくことで細菌やカビなどの繁殖をまねき、目の感染症を引き起こす原因となることがあります。ソフトコンタクトレンズを安全に使用するには、毎日の洗浄・消毒を正しく行うことが必要です。

この箱に入っているもの


！ 開封時に必ず確認してください。

- エーオーセプト®クリアケア®<消毒液>…1本
- ディスボカップ<中和用ディスク付専用消毒容器>…1個

1本の消毒液を使いきる毎に、同梱の新しいディスボカップに必ず取り替えて下さい。

ディスボカップのフタに穴があいて
いる理由は？

フタにある穴は、中和によって発生した気泡を逃がすためのものです。消毒・中和中はその穴をふさがないように、またディスボカップを横にしないでください。

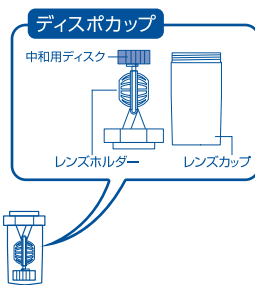


使用方法

- ソフトコンタクトレンズを取扱う前に必ず石けんで手指をよく洗います。
- 消毒前に保存液（ソフトウェアプラスなど）でこすり洗いをする事で、安全で清潔なレンズを装用することができます。

1 レンズホルダーの左右のバスケットにレンズを入れます。

（「L」と表示してあるバスケットのレンズホルダーに左のレンズをセットします）
バスケットのふちでレンズをはさみ込まないようにフタを閉めます。

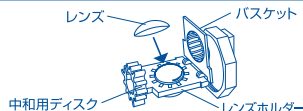


2 消毒液をレンズカップの内線まで入れます。

- ・この時、消毒液が少なかったり、入れすぎたりしないようにしてください。
- ・消毒液を入れすぎると、中和されていない消毒液がフタからもれ出ることがあります。



3 レンズを入れ、6時間以上放置します。

- ・常温で消毒・中和を行ってください。低温下（10℃以下）で消毒した場合は、中和完了に6時間以上かかる場合があります。
- ・冬場はなるべく暖かい部屋でご使用ください。
- ・消毒・中和が6時間以上経過していないレンズは装用しないでください。
- ・液がもれるためディスボカップを横にしないでください。
- ・消毒・中和後のレンズを24時間以上保存した場合は、装用前に再度消毒・中和を行ってください。

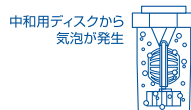


■装用前にソフトコンタクトレンズ用保存液ですすいでから装用することをおすすめします。

！ エーオーセプト®クリアケア®消毒液でレンズをすすがないでください。

！ 必ず付属のディスボカップをご使用ください。

■レンズケアの最後に…
レンズカップとレンズホルダーを流水（水道水）ですすぎ、レンズホルダーをレンズカップからはずした状態で自然乾燥させます。

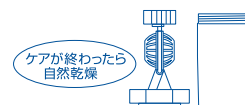

使用上の注意

1.守らなければならないこと

- (1) この使用説明書に記載してある使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると消毒が不完全となり、角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。またそれを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- (2) レンズを取扱う前には、必ず石けんでよく手指を洗ってください。
- (3) 中和が完全に終わっていない状態（消毒・中和開始後6時間未満）で、レンズを装用しないでください。中和せずにレンズを装用した場合には、すぐにレンズをはずし大量の流水またはぬるま湯で目を洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- (4) 消毒液には防腐剤は含まれておりません。中和後の液に24時間以上レンズを保存した場合には、装用前に再度消毒・中和を行ってください。
- (5) レンズを取り出した後のディスボカップは、流水（水道水）でよくすすいで自然乾燥させてください。
- (6) 目に異常を感じなくても、指示された定期検査を必ず受けてください。
- (7) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

2.してはいけないこと

- (1) 本剤はソフトコンタクトレンズの消毒にのみ使用し、飲まないでください。
- (2) 消毒液は直接目に入れないでください。誤って目に入った場合には、大量の流水またはぬるま湯で目を洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- (3) 容器の先にふれますと、雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますのでご注意ください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) 煮沸消毒に使用しないでください。また、他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と混ぜて使用しないでください。併用すると過剰発泡の原因となります。
- (5) 一度使用した消毒液は消毒効果がありませんので、再使用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 一度出した消毒液を再びボトル容器に戻さないでください。

3.相談すること

- (1) 次の人は使用前に眼科医にご相談ください。[a]今までに目のアレルギー症状（例えば、目の充血、かゆみ、はれ、発疹、発赤等）を起こしたことがある人。[b]医師の治療を受けている人
- (2) 本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装用中、または装用後に、炎症、疼痛、かゆみ、流涙、かすみ等の異常を感じた場合には、直ちにレンズの使用を中止し、眼科医に相談してください。そのまま装用続けると、感染症、角膜潰瘍などの重い眼障害につながることがあります。
- (3) 使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用してください。

効能・効果

ソフトコンタクトレンズ(グループI～グループIV)の消毒

用法及び用量

消毒液とディスボカップを組み合わせて使用します。

1.消毒液をディスボカップの線まで満し、コンタクトレンズを入れ、6時間以上放置します。

2.取り出したコンタクトレンズをそのまま装用します。

●1本の消毒液を使いきる毎に、新しいディスボカップに取り替えます。

有効成分

[消毒液]過酸化水素 3.42w/v% [中和用ディスク] 1個中、白金1.5mg

配合成分

安定化剤、緩衝剤、pH調整剤、等張化剤、界面活性剤（ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール）

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 使用後はキャップをしっかりと閉めて、直射日光を避け、室温で保管してください。
- (3) 冷蔵庫での本剤の保管はしないでください。
- (4) 誤用を避け、品質を保持するため、消毒液を他の容器に入れ替えないでください。
- (5) ディスボカップに消毒液を入れる際、注ぎ口をレンズカップ内の消毒液につけないようご注意ください。
- (6) 本液を使用の際は必ず同梱の専用ディスボカップをご使用ください。その他のレンズケースは使用しないでください。
- (7) ディスボカップは同梱の消毒液を使いきったら、新しいものと交換してください。
- (8) ディスボカップはエーオーセプト®クリアケア®以外の消毒剤ではご使用になれません。
- (9) ご使用の際はディスボカップのフタを完全に閉めてください。中和中に液が漏れることがあります。
- (10) 中和中のディスボカップを携帯すると液が漏れるため、ディスボカップは携帯用として使用しないでください。携帯用レンズケースを使い一時的にレンズ保存をする場合は、必ずソフトコンタクトレンズ保存液（ソフトウェアプラスなど）をご使用ください。
- (11) 使用期限はパッケージ上面に刻印してあります。（EXP○○○○○＝使用期限○○○○○）なお、容器を開封したら3ヵ月以内に使用してください。

この消毒システムは、すべてのソフトコンタクトレンズに使用できます。

販売名：エーオーセプト プラス

製造販売元（輸入元）

日本アルコン株式会社

東京都港区赤坂2-17-7

http://www.lenscare.jp ©2013 Novartis

お問い合わせ・ご相談は、下記フリーダイヤルまで

0120-389103

（オペレーター 24時間 365日）

通話内容は弊社サービスの向上のために自動的に録音させていただきます

J1866E3