

隠れた国民病？

手指のしびれ・痛み・変形...



手指関節のトラブル


1 どんな病気？どんな症状？

手指関節のトラブルの症状は様々。日常生活で繊細な動きを求められる手や指は、使う機会が多いほど負担がかかってしまいます。重い荷物を持ちたり、手や指に力を入れるスポーツ、パソコンの入力などの長時間に渡る細かい作業、加齢による手・指の変形や筋肉の衰えなどが痛みの原因。



関節リウマチ

手指関節の炎症に伴うこばわり、腫れや痛みなどです。進行すると関節の軟骨や骨が破壊され、関節の脱臼や変形などが生じます。

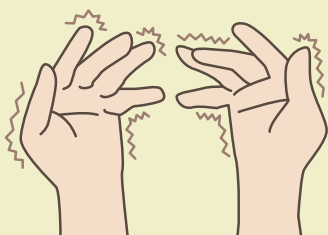

治療法

炎症を抑える薬物療法が主流。痛みがおさまらない時は、患部のテーピング・装具を使用。

ヘバーデン結節

指の第1関節が変形し曲がってしまう疾患です。痛みや腫れが伴うことがあり、指の動きが悪くなり、強く握ることが困難になります。安静にしていると症状は軽減しますが、時に水泡（ミューカスシスト）を伴うことも。



治療法

炎症を抑える薬物療法と、患部のテーピング。

ブシャール結節

指の第2関節が変形し曲がってしまう疾患です。痛みや腫れが伴うことがあります。「ヘバーデン結節」との違いは、第1関節ではなく、第2関節に症状がおこります。




治療法

炎症を抑える薬物療法と、患部のテーピング。


2 どんな人が発症する？

女性に多い！

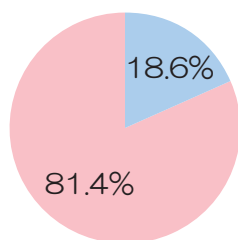

男女別分布はグラフのように、男性 18.6%、女性 81.4%と「女性」が多い傾向。

50～60代に多い！

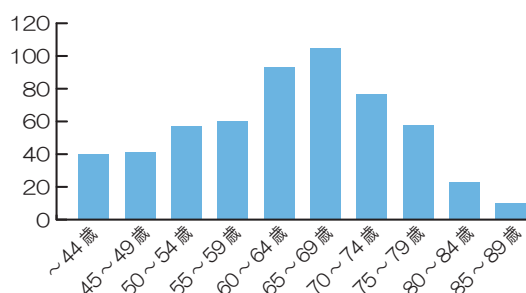

2016年1月～2018年6月の新規変形性指関節症の患者年齢分布です。「50歳」を過ぎたころから増加傾向にあります。

痛む手指関節を固定するテーピングテープ ディップエイド® ケア

一般医療機器 救急絆創膏


販売名：ディップエイドケア

届出番号：14B3X1001600040

✓ 手指関節の運動抑制に効果的

素材に厚み・弾力性・伸縮性があるため、
運動抑制・固定に効果的

✓ H型の形状で貼りやすい

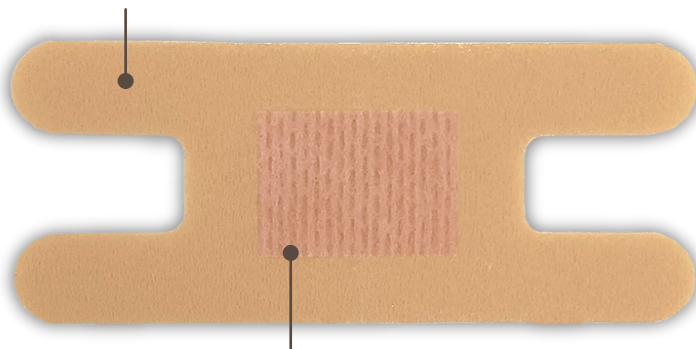

✓ 水泡があっても剥がすとき安心

非粘着性のパッドで関節・水泡を保護

✓ 低刺激で皮膚にやさしい

アクリル系粘着剤の使用により、
皮膚への刺激が弱くかぶれにくい




✓ 水仕事 OK

防水素材のため貼付した
まま水仕事が可能




使用方法 (例：人差指第一関節)

*非粘着部分(吸収パッド
ではありません)

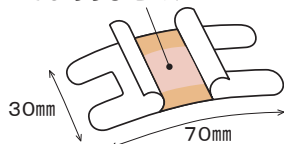

1 剥離紙をめくります

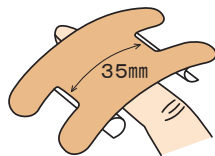

2 固定する場所に非粘着部分の中央を位置します



3 剥離紙をはがして指に巻きます

素材

ポリエチレン
(アクリル系粘着剤)

規格

オープン価格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
060153	30mm×70mm 1枚入×30包	1箱	4958995601534	10箱

