

Bausch & Lomb

ボシュロム セーラインソリューションプラス。

使用説明書


ソフトコンタクトレンズ用保存剤
主成分：塩化ナトリウム、塩化カリウム

セーラインソリューションプラスはグループI~IVのすべてのソフトコンタクトレンズに使えます。本剤は涙の成分、ポタシウムを配合した調合・滅菌済みのソフトレンズ用保存液です。ソフトレンズのすすぎ、熱消毒、保存やタンパク質除去剤の溶解に使用してください。親水性ソフトレンズは、水分を含むとやわらかくなる親水性のプラスチックで作られているため、レンズを乾燥させると汚れが固着したり壊れやすくなります。レンズをいつもやわらかく快適な装着状態に保つために、セーラインソリューションプラスで保存してください。

コンタクトレンズ及びケア用品をご使用の際は眼科医の指示に従い、それぞれの添付文書をよく読み、正しい使用方法を守ってください。誤った使用法はレンズの劣化を早めたり、眼に障害を起こす原因となることがあります。また、添付文書は必要な時に読めるように大切に保管してください。

使用方法

1. ソフトレンズ用洗浄液でレンズを洗浄した後、セーラインソリューションプラスを手のひらにためた状態でこすりながら十分にすすぎ洗いをし、ヌルヌルした感じがなくなるまで繰り返します。

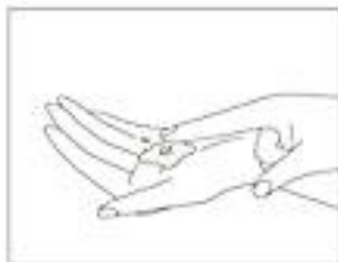

2. レンズを熱消毒するときは、レンズケースにセーラインソリューションプラスを2/3位まで満たします。



3. よく洗浄しすすいだレンズの凹面を上向きにして、左右を間違えないよう注意してレンズケースに入れ、熱消毒器で熱消毒します。



- 熱消毒できないソフトレンズもありますのでご注意ください。
- 消毒剤で消毒・保存する場合は、消毒剤の添付文書に従ってお使いください。

<一週間以上装着しない場合の保存方法>

レンズを一週間以上使用しない場合は、洗浄、タンパク質除去、熱消毒を行い、直接日光が当たらない場所で室温保存してください。その後は、一週間ごとにレンズケース内の保存液の入れ替えと熱消毒を行って保存してください。(保存液を入れ替えないと、レンズの劣化や変形・変色の原因になります。)

- 裏面も必ずお読みください。

使用上の注意

1. 使用に際し次のことに注意してください。

- 開封時、キャップに封印フィルムがついていない製品は、絶対に使わないでください。
- レンズを取り扱う前に必ず手を石けんでよく洗ってください。
- レンズをはすしたら必ずすぐに洗浄と消毒を行ってください。汚れはすぐに洗浄しないと固着してとれなくなることがあります。また、洗浄と消毒を怠るとレンズに汚れが蓄積し、カビや細菌が繁殖する原因になります。
- レンズケースはいつも清潔にしてください。レンズケースが汚れているとレンズにカビや細菌が繁殖する原因になります。レンズケースは水道水でしっかりすすぎ洗いし、自然乾燥させてください。(洗剤などは使用しないでください。)

2. 使用中または使用後は次のことに注意してください。

- 本剤はコンタクトレンズのケアのみに使用し、内服しないでください。誤って内服した場合はできるだけ吐き出し、すぐに医師の診察を受けてください。
- 眼や皮フに刺激や異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

3. 保管及び取り扱いには次のことに注意してください。

- 汚染を避けるため、ボトルの注ぎ口に指や他の器物が触れないように注意してください。また、使用後は速やかにボトルのキャップをしっかりと閉めてください。
- 誤用を避け品質を保持するために、他の容器に移し替えて使用しないでください。
- 他の液剤と混ぜて使用しないでください。
- メニコン社のメニクリーンとの併用はお避けください。(弊社適合性テストによる。)
- 一度使用した液剤は再使用しないでください。
- 使用期限の過ぎたケア用品は絶対に使用しないでください。(使用期限はケア用品のパッケージやボトルなどに"EXP"または"Ⓜ"として表示されていますのでご確認ください。)
- 直射日光を避け湿気の少ない状態で、室温保存してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 開封後はなるべく早く使い切ってください。

品質管理には万全を期しておりますが、万一製品にお気付きの点がございましたら弊社お客様相談室までご連絡ください。

輸入販売元
ボシヨロム・ジャパン株式会社
東京都品川区南大井6-26-2

ボシヨロム製品についてのお問い合わせは
 0120-132490
<http://www.bausch.co.jp>

BAUSCH & LOMB and BAUSCH & LOMB SALINE SOLUTION PLUS are registered trademarks of Bausch & Lomb Incorporated.
©Bausch & Lomb Incorporated

7724308