

# プロテオフ

## 〈使用説明書〉

主成分：タンパク分解酵素 容量：5.5mL **点眼・服用厳禁**

### 特長

プロテオフは毎日のケアの際にO<sub>2</sub>ケアに1滴加えて使用する、つけおきタイプのタンパク分解酵素洗浄液です。O<sub>2</sub>ケアの脂質洗浄機能とプロテオフのタンパク分解遊離機能が保存中にレンズ洗浄を可能にしました。つけおきタイプなので、レンズ全面に均等に作用し、汚れをすっきり落とします。



ワンタッチキャップを開け、底面のプッシュボタンを押すと液が出ます。

**使用方法** ※レンズを取り扱う前に手を石けんで洗い、水道水(流水、以下同じ)で十分すすいでください。

### ●レンズを眼からはずし保存する時

**1** レンズケースにO<sub>2</sub>ケアを約9分まで入れます。



**2** プロテオフの本体底部のプッシュボタンを押し、プロテオフをレンズ1枚につき1滴加えます。(※1)



**3** 眼からはずしたレンズをホルダーに収納し、レンズケースに入れます。



**4** レンズケースのキャップをしめ、レンズケースを軽く振り、一晩(2時間以上)保存します。



### ●レンズをはめる時

**5** レンズをホルダーごとレンズケースから取りだし、水道水ですすぎます。(※2)



**6** ホルダーからレンズを取り出し、O<sub>2</sub>ケアを十分に付けたら、爪がレンズにふれないように3本の指の腹で十分にこすり洗いしてください。



**7** レンズを再びホルダーに収納し、水道水で十分にすすいだ後、眼にはめてください。(※3)



**8** 使用後のレンズケースは保存液をすて、水道水ですすぎ洗いし、自然乾燥させてください。



※1 プロテオフはレンズ1枚につき1滴で効果を発揮します。貫通型レンズケースの場合は、2滴入れてください。また、滴下口にO<sub>2</sub>ケアに触れないよう、プロテオフを滴下してください。

※2 ホルダーに収納してレンズを水道水ですすぐ際は、レンズが脱落しないように、親指とさし指でホルダーを横から軽くはさむようにして持ってください。必ず水栓もしてください。

※3 レンズをはめてみる場合は再度すすぎなおしてください。

## 使用方法をお守りください

- ご使用前には必ずこの使用説明書をよく読み、また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。表現や内容で分からないことがあれば、必ず眼科医又は販売店に相談し、よく確認してからご使用ください。
- 取扱方法を誤るとレンズが装着できなくなるばかりか、眼に障害を起こす場合があります。少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の診察を受けてください。
- そのまま放置すると重い眼障害を引き起こす場合があります。
- O<sub>2</sub>ケアと組み合わせて使用してください。他社製品や水道水などと組み合わせて使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- レンズの取り扱いについては、レンズの添付文書をよく読み、使用方法をお守りください。

## 使用上の注意

- 今までにケア用品などによってアレルギー症状などを起こしたことがある場合は、使用前に眼科医に相談してください。
- 点眼・服用しないでください。誤って眼に入った場合は、すぐに水道水(流水、以下同じ)で眼をよく洗い、眼科医の診察を受けてください。誤って飲んだ場合は、すぐに水道水を飲み、医師の診察を受けてください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 変質・変色したものは使用しないでください。
- 小さなお子さまがご使用になる場合には、保護者の方の指導監督をお願いします。
- タンパク洗浄に使用した液は再使用しないでください。

## 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光を避け、冷暗所(冷蔵庫など)に凍結を避けて保管してください。
- 小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。
- レンズ装着中、眼や皮ふに異常を感じた場合は、レンズとプロテオフの使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はキャップをしっかりとめて保管し、できるだけ早めに使用してください。
- 使用後は手を水道水でよくすすいでください。
- 容器の先端に手指などが触れないようにしてください。
- 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器には入れ替えないでください。
- 衣服などについた場合は、シミが残る場合があるため、すぐに水道水ですすぎ流してください。
- レンズケースは長時間使用していると汚れ等の蓄積により不衛生になることがありますので、レンズケースは定期的に新しく交換することをおすすめします。
- レンズを長期間保存する場合は、通常のプロテオフ処理後、レンズケースに新しいO<sub>2</sub>ケアを入れレンズを収納します。その後は1か月ごとにO<sub>2</sub>ケアを入れ替えてください。

◎本液を使用してもレンズのくもりや装着感が気になる場合は、強力タンパク洗浄液「プロジェント」(別売)の併用をおすすめします。

◎お気づきの点はこちらまでご連絡ください。

メニコンお客様センター

**メニコン**  **0120-103109**

受付時間/9:00~18:00 ※日・祝日を除きます。

株式会社 **メニコン** 名古屋市中区葵三丁目21番19号



登録：PP