

Nasal Wash

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください

届出番号 04B2X00009001002
機械器具55 医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器(JMDNコード 41599000)

ハナノアb

形状・構造及び原理等

ノズルキャップ部
(ポリエチレン)

イメージ図

チューブ部

ボトル本体部



【形状及び構造】ボトル状で
鼻腔内に挿入するための供給
突起を有し、ノズルキャップ
部(ポリエチレン)とチューブ部、
ボトル本体部の3部品から
構成される
【原理】外鼻孔から洗浄液を流
し込んで鼻腔内を洗浄する
鼻用洗浄器

使用方法等

1. 器具に液を入れる

目盛り線(50mL 両鼻分)を目安に洗浄液を
入れ、チューブを装着したノズルキャップを
つけてください

容器内のチューブが下向きになっているの
をご確認ください

(△のマークが合うように最後までギョッと
キャップを閉めこんでください)

2. 液を鼻の中に流し込む

ボトル本体の△のマークがある方を上に洗浄
器具を持ち、鼻の穴にフィットさせてください
図のように少し下を向き、ボトル本体の中央
部を押して洗浄液を鼻の中に流し込み、左右
の鼻を洗浄してください

※洗浄液は同じ鼻の穴や、口からも出ます
口に流れ込んだ洗浄液は、吐き出してください

●1日1~3回を目安に使用してください


●上手に洗うポイント

「アー」と声を出しながら流し込むと、耳の奥
に洗浄液が流れにくくなり、無理なく鼻うがい
ができます

●使用方法に関する注意

(1)上を向いて使用しないでください。また
洗浄後、強く鼻をかまないでください[耳の
内部に洗浄液が入り、中耳炎になる恐れが
ある](2)洗浄液の逆流を防ぐため、ノズルを
鼻から外した後で手をゆめてください

(3)洗浄液が鼻や口から流れ落ちますので、
洗面台等で使用することをおすすめします
(4)洗浄液を勢いよく流し込んだり、鼻から
洗浄液を強く吸い込むと、鼻に痛みを感じる
場合があります

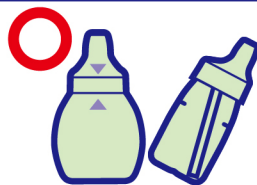

効果

風邪や花粉の季節には、鼻の奥深くまで雑菌
や花粉が入り込みトラブルを引き起こします
本品は、鼻の奥に入り込んだ雑菌や花粉を
しっかり洗い流すための商品です

使用上の注意

(1)15才未満の小児には使用させないこと
(2)嚥下障害がある方(食べ物や飲み物を飲
み込みにくい方)は使用しないこと[洗浄液が
気管支や肺に入る恐れがある](3)耳鼻咽喉
科の治療を受けている方は、使用前に医師に
相談すること(4)洗浄後、強く鼻をかまないこ
と(5)鼻の洗浄のみに使用し、目や耳には使
用しないこと(6)鼻の炎症、鼻づまりがひどい
ときは使用しないこと(7)目に入らないよう
に注意すること。万一、目に入った場合は、こす
らずに、すぐに流水で洗い流し、異常が残る場
合はこのパッケージを持って医師に相談する
こと(8)洗浄液を飲み込み異常が残る場合
や、耳の内部に洗浄液が入り1日以上抜けな
い場合や、使用中に万一異常が生じた場合は、
このパッケージを持って医師に相談すること

保管及び取扱い上の注意

(1)小児の手の届かない所に保管すること
(2)直射日光、高温多湿の場所を避け、冷暗
所に密栓して保管すること(3)他の容器に
入れ替えないこと[誤用の原因になったり、
品質が変わることがある](4)使用期限(パッ
ケージ底面、ボトル裏面に記載)を過ぎた洗浄
液は使用しないこと

保守・点検に係る事項

(1)使用後はノズル・チューブを外して洗浄器
具をよく洗って乾かし、清潔な場所で保管し
てください(2)熱湯での洗浄、ドライヤー等高温
での乾燥はしないでください[変形の恐れが
ある](3)洗剤等は使わず水だけで洗ってくだ
さい[破損の恐れがある]

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売元・製造元

仙台小林製薬株式会社

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平4-3

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-06

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

洗浄器具:1個 ハナノア専用洗浄液
成分:精製水、塩化Na、グリセリン、香料、ポリソル
ベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、
エデト酸Na 内容量:500mL