


保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管すること
- (2) 直射日光、高温多湿の場所を避け、冷暗所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと[誤用の原因になったり、品質かわることがある]
- (4) 使用期限(箱底面に記載)を過ぎた洗浄液は使用しないこと

形状・構造及び原理等

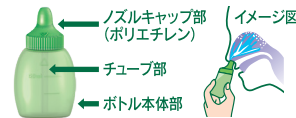

【形状及び構造】ボトル状で鼻腔内に挿入するための供給突起を有し、ノズルキャップ部(ポリエチレン)とチューブ部、ボトル本体部の3部品から構成される

【原理】外鼻孔から洗浄液を流し込んで鼻腔内を洗浄する鼻用洗浄器

使用上の注意

- (1) 15才未満の小児には使用させないこと
- (2) 嚥下障害がある方(食べ物や飲み物を飲み込みにくい方)は、使用しないこと [洗浄液が気管支や肺に入る恐れがある]
- (3) 耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談すること
- (4) 洗浄後、強く鼻をかまないこと
- (5) 鼻の洗浄のみに使用し、目や耳には使用しないこと
- (6) 鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないこと
- (7) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、こすらずに、すぐに流水で洗い流し、異常が残る場合はこの箱を持って医師に相談すること
- (8) 洗浄液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液が入り1日以上抜けない場合や、使用中に万一異常が生じた場合は、この箱を持って医師に相談すること

MADE IN JAPAN

10194867

2020年7月作成(第1版)

Nasal Wash

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください

また必要なときに読めるよう大切に保管してください

開け口

使用方法等

1. **ボトル本体に「原液」を入れる** 原液1包を開け、全量をボトル本体に注いでください
2. **水道水で目盛りまで薄める** 水道水(40℃以下)で50mLの目盛線まで薄め(両鼻分)、チューブを装着したノズルキャップをつけてください

容器内のチューブが下向きになっているのをご確認ください(▽△のマークがあうように最後までギュッとキャップをしめる)中身がこぼれないよう軽くボトルで振りませ、洗浄液としてください

3. **洗浄液を鼻の中に流し込む** ボトル本体の▽のマークがある方を上に持ち、鼻の穴にフィットさせてください。図のように少し下を向き、ボトル本体の中央部を押して洗浄液を鼻の中に流し込み、左右の鼻を洗浄してください。※洗浄液は同じ鼻の穴や、口からも出ます。口に流れ込んだ洗浄液は、吐き出してください

●1日1~3回を目安に使用してください

●**上手に洗うポイント** 「アー」と声を出しながら流し込むと、耳の奥に洗浄液が流れにくくなり、無理なく鼻うがいができます

●**使用方法に関する注意** (1) 他の鼻洗浄器等で原液を使用しないでください(2) 国内のきれいな水道水で薄めてください

(3) 作り置きせず、使用直前に薄めるようにしてください

(4) 上を向いて使用しないでください。また洗浄後、強く鼻をかまないでください[耳の内部に洗浄液が入り、中耳炎になる恐れがある]

(5) 洗浄液の逆流を防ぐため、ノズルを鼻から外した後で手をゆるめてください(6) 洗浄液が鼻や口から流れ落ちますので、洗面台等で使用することをおすすめします(7) 洗浄液を勢いよく流し込んだり、鼻から洗浄液を強く吸い込むと、鼻に痛みを感じる場合があります(8) 水道水で薄めずに原液をそのまま使用すると鼻に痛みを感じる場合があります。長時間痛みを感じる場合は、この箱を持って医師にご相談ください



× 奥に入れたまま手をゆるめない

保守・点検に係る事項

- (1) 使用後はノズル・チューブを外して洗浄器具をよく洗って乾かし、清潔な場所で保管してください(2) 熱湯での洗浄、ドライヤー等高温での乾燥はしないでください[変形の恐れがある]
- (3) 洗剤等は使わず水だけで洗ってください[破損の恐れがある]

製造販売届出番号 04B2X00009001004

機械器具55 医療用洗浄器

一般医療機器 鼻用洗浄器 UMDNコード 41599000

チクナイン鼻洗浄器

特徴

① 鼻の奥まで洗える

たっぷりの洗浄液で洗い流すので、かみきれない鼻水・膿をしっかり洗い流すことができます

② 簡単に鼻うがいができる

無理なく使えるシャワータイプなので、鼻うがいが苦手な方でも簡単に鼻うがいができます

効果

本品は、ちくのう症・副鼻腔炎などによるかみきれない鼻水・膿を洗い流すための商品です

洗浄器具: 1個 チクナイン洗浄器原液
内容量: 10mL×6包
成分: 精製水、炭酸水素Na、塩化Na、PG、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-06

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等
製造販売元・製造元

仙台小林製薬株式会社

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平4-3