


使用に際してはこの説明書をよくお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第一三共ヘルスケア・ワコール共同開発

パテックス® 機能性サポーター

ひざの安定と装着時の快適性を追求

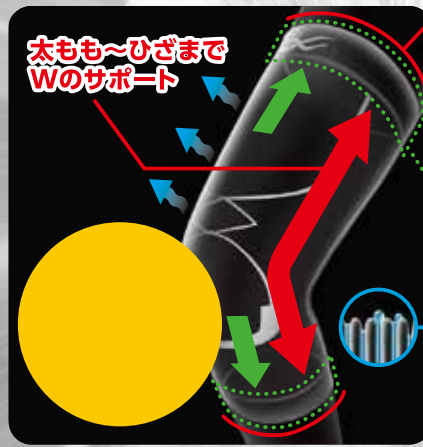

ロングタイプ

ひざ関節だけでなく、大腿四頭筋までトータルサポートし、ひざ関節を安定させ、衝撃を緩和します。

独自のズレ軽減機能

上下に使用したナノテクノロジー素材表面のナノサイズの凸凹が大きなグリップ力を発揮し、上下のズレを軽減します。

吸汗素材を採用

汗が毛細管現象で繊維と繊維の隙間に吸い上げられ、生地表面から蒸発します。

製造番号(左から4桁)

着用上の注意

1. からだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止して下さい。
2. ひざ以外には使用しないで下さい。
3. サイズの合わないものは使用しないで下さい。
4. 他の商品との重ねばきや、まくれあがった状態での使用はしないで下さい。
5. 使用する際には、「しゃがむ」「正座する」等の同じ姿勢をとり続けしないで下さい。
6. 就寝中には使用しないで下さい。
7. 着用位置がズレると、適正な機能が得られませんので、注意して下さい。
8. 機能のあらわれ方には個人差があります。

お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10
<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造元 株式会社ワコール
MADE IN JAPAN



® 登録商標
CW-Xは(株)ワコール
の登録商標です。

03

着用方法

デリケートな素材を使用しているため、着脱の際に無理に引っ張ったり爪を立てたりしないで下さい。

①

マークの方が上です。



②

全体を手のひらに寄せてたくし上げるようにして脚を通します。



③

爪を立てないように注意しながら少しずつ引き上げていきます。



④

イラストの○部分がひざの皿の位置に来るように調整します。



⑤

足を伸ばした状態で、たるみがないようによく伸ばして下さい。




サイズの選び方

●イラストのように、ひざ頭の周囲を測って下さい。

Mサイズ 34cm~37cm

Lサイズ 37cm~40cm

LLサイズ 40cm~43cm(黒のみ)

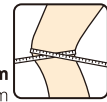

着脱上の注意

1. 製品の特性上、過度の圧力が部分的に加わると破れ等が発生することがありますので、着脱の際は注意して下さい。2. 製品の特性上、爪などで引っ掛けると、引きつれたり、糸が引き出してくる場合がありますので、着脱の際は注意して下さい。


保管及び取扱い上の注意

1. 火の近くや高温になる場所に置かないで下さい。2. 耐久性を損なうことがありますので、洗濯表示に従って取り扱って下さい。3. 洗濯する時は、洗濯用ネットに入れて洗濯して下さい。4. 着用中、摩擦等により他のものに色移りすることがあります。5. 洗濯中、色落ちすることがありますので、白又は淡色物とは別にして洗って下さい。6. 着用後又は洗濯後、長時間めれたままにしておくと、他のものに色移りすることがありますので注意して下さい。7. 乾燥機、アイロン等で強制乾燥はしないで下さい。

洗濯表示



ネット使用

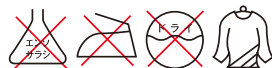

タンブル乾燥禁止

品質表示:ポリエステル、ポリウレタン